

# SEMIMASCHERA FFP2 NR D

FILTRANTE, MONOUSO, NON STERILE,  
IPOALLERGENICA SENZA LATTICE

## DESCRIZIONE

Semimaschera filtrante monouso FFP2 NR D, ipoallergenica, senza lattice e senza fibre di vetro; 5 strati di protezione: stato esterno in TNT Spunbond, doppio filtro Meltblown, strato di Air Cotton e ultimo strato in TNT Spunbond, per garantire un **alto potere di filtraggio**, con barretta nasale conformabile. Imbustate singolarmente per garantire il massimo dell'igiene. Colore bianco. Conforme alla normativa **UNI EN 149:2001+A1:2009**.

## DESTINAZIONE D'USO - DPI

Dispositivo di protezione individuale di III categoria ai sensi del Reg. UE 2016/425.

## MATERIA PRIMA

TNT Spunbond, filtro Meltblown e Air Cotton.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Igienizzare le mani con gel alcolico o lavarle con acqua e sapone prima di toccare la semimaschera. Estrarre la busta di plastica dal box e, una volta aperta, controllare che la semimaschera non sia rotta o abbia dei buchi. Distenderla sul viso tenendo lo stringinaso in alto, agganciando gli elastici dietro le orecchie. Sagomare bene la semimaschera nella parte superiore e lungo i lati delle guance. Assicurarsi che copra naso, bocca e mento. Controllare che il DPI sia indossato correttamente e faccia tenuta come segue (per DPI senza valvola): coprire la semimaschera con entrambe le mani ed espirare vigorosamente. Se l'aria passa attraverso i bordi ed intorno alle narici, sistemare nuovamente il DPI sul viso e stringere il clip nasale. Ripetere l'operazione sino ad ottenere un risultato ottimale. Dopo l'utilizzo, togliere la semimaschera dagli elastici senza toccarne la parte esterna, soprattutto se contaminata. Lavare le mani con gel alcolico o acqua e sapone, dopo aver rimosso la semimaschera.



BFE PFE ≥95%  
LATEX FREE

IMBUSTATA  
SINGOLARMENTE



## CONSIGLIATO PER



Industria  
alimentare



Bricolage



Professionale



Tatuatori



Laboratori



GLASS  
FIBERS  
FREE



PHTHALATE  
FREE



LATEX  
FREE



ALTO POTERE  
FILTRANTE



## PROPRIETÀ FISICHE

Barretta nasale	In metallo zincato ricoperto, facilmente modellabile ed atraumatico
Efficienza Filtrante B.F.E. PFE	≥ 95% per particelle non inferiori a un micron
Dimensioni	In conformità alla normativa di riferimento
Test opzionale D	Conforme al requisito di intasamento

## TAGLIE DISPONIBILI



taglia unica bianco  
COD. PROD. MASFFP2N25



## CERTIFICAZIONI E PITTGRAMMI



## CONFEZIONAMENTO

IMBUSTATE SINGOLARMENTE  
CONFEZIONE DA 25 PEZZI  
CARTONE DA 30 BOX  
PALLET DA 20 CARTONI